



TARETT AKUT, STICK/ PROVTAGNINGSVAGNAR

**OBS! Läs alltid bruksanvisning innan vagnen tas i bruk.
(Tarettvagnar har etikett med modellbeteckning, serie-
nummer och tillverkningsår).**

SKÖTSELRÅD, ANVISNINGAR

Skötselråd, anvisningar

SÄKERHET Tarett Akutvagn3030 stick/provtagningstvagnar 6010 och 6045: Tarettvagnar kan säkerhetsmässigt inte jämföras med fasta och låsta läkemedelsförråd/rum.

Akutvagnar på avdelningar/mottagningar bör då de inte används hållas under uppsikt alternativt placeras centralt vid expeditioner eller i förråd. Tarett vagnar som är utrustade med ett centrallås utgör en säker och enkel inlåsning av samtliga lådfunktioner.

Standardvagnar inkl centrallås levereras med ASSA cylinder 1300 (D13) inkl 3st nycklar. Vagnar kan även förses med ASSA systemcylindrar i olika säkerhetsklasser. Flera vagnar kan förses med lika låscylindrar. Tarettvagnar kan även vara utrustade med elektroniska kortläsare av olika modeller alt med plomberingsmekanik.

Centrallås

FUNKTION: Centrallåset kan förses med ASSA låscylinder och tillhörande nycklar, elektronisk kortläsare (E-cylinder) och nödöppningslås, alt med plomberingsmekanik.

Låsning av vagn 3030 sker då toppluckorna stängs (ett klickande ljud hörs).

Vagn 3030, 6010, 6010-4 och 6045 med Staron toppskiva och sidomonterat centrallås art 6010-22 öppnas/låses med centrallåsets handtag

För att låsa upp vagn med elektronisk kortläsare används programmerat kort, tag alt E-tjänstkort eller ASSA-nyckel via nödöppningslås art 293-2

Vagnar kan sakna central låsfunktion av lådor om beställaren valt bort denna funktion.

Vagn försedd med Infusionsstativ

Vagnens infusionsstativ är ett hjälpmedel vid beredning av läkemedel/infusioner.

OBS! Läkemedel/infusioner som hänger på vagnens infusionsstativ skall inte anslutas till patient.

Vagn försedd med Klaffskiva

Max belastning på klaffskiva är 10 kg.

Rengöring allmänt

Vagnen kan rengöras med i sjukvården vanligt förekommande rengöringsmedel. Samtliga ytor och tillbehör tål spritvätt (70 % etanol). Avfallsbehållare och plastkoppar i toppskiva tål maskindisk 55°C Tarettvagnar tål inte avspolning eller nedsänkning.

Vagnarnas ytersidor bör inte rengöras med rengöringsmedel, kemikalier eller rengöringsvamp/duk som innehåller slipmedel (tex. svamp med scotchbrite). Staron toppskiva kan rengöras med Scotchbrite (grön) i kombination med rengöringsmedel

Om fel uppstår – Felsökning

HJUL: Om hjulen kärvar eller behöver rengöras:

Palla upp vagnen så att hjulen hänger fritt från golvet (ex. på tråklossar).

Avlägsna smuts och eventuellt håravfall samt rengör enligt ovan (rengöring allmänt).

Vid behov byt hjul. Hjul finns som reservdel och kan beställas från Inpart Trading AB.

CENTRALLÅS: Om låset kärvar: (ASSA cylinder) Spraya låsspray i låscylindern.

Om problem kvarstår, kontakta Inpart Trading AB eller lokal tekniker. Elektronisk kortläsare kontakta Inpart Trading AB eller lokal tekniker.

Viktigt!

Spara bruksanvisning/skötselråd i anslutning till vagnen eller på avd. Vid övriga frågor är ni välkomna att kontakta Inpart Trading AB

Inpart Trading AB

Kalkbruksvägen 3, 610 71 Vagnhärad, Tel 0156-132 06, 0156-132 10, Fax 0156-132 01
info@inparttrading.se www.inparttrading.se